

CONFERENCE™


En samtaleforsterker med to mikrofoner og en teleslynge innebygd i en elegant konferansemappe.

Praktisk konferansemappe

Conference™ er et unikt produkt som gjør det lettere for hørselsskadede å delta i møter på jobb og hjemme. To mikrofoner, en forsterker og en teleslynge er innebygd i en elegant konferansemappe, som brukeren plasserer på bordet foran seg.

Doble mikrofoner

Conference er utstyrt med to mikrofoner som forkorter taleavstanden til møtedeltakerne og overfører lyden til høreapparatet. Hvis man ønsker enda kortere avstand til den som snakker, kan man bruke en ekstern mikrofon istedenfor de innebygde.

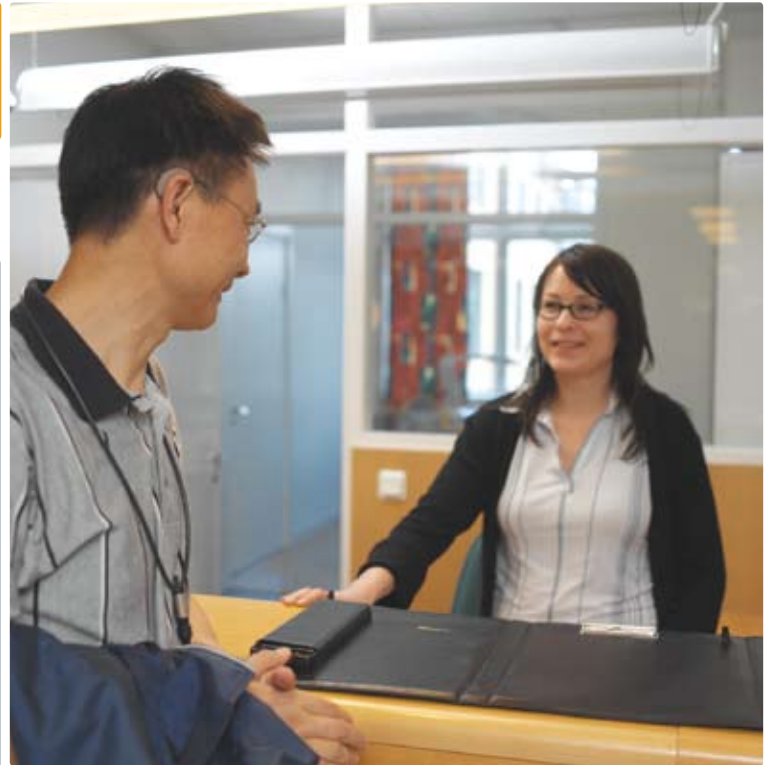

Innebygd teleslynge

Den innebygde teleslyngen gjør det mulig for høreapparatbrukere å benytte T-stillingen på høreapparatet. En hals-slynge følger også med og gir en litt større bevegelsesfrihet. Den innebygde teleslyngen kobles ut når hals-slyngen er i bruk.


Spille inn et møte


Iblant vil man ikke gå glipp av viktig informasjon, og ta kan det være praktisk å spille inn konversasjonen fra et møte. Conference er utstyrt med et 3,5 mm uttak som brukes for både innspilling og avspilling i mono.

Batteridrift

Conference drives av batterier og har lavt stømforbruk. Ved normal bruk holder batteriene i ca. 100 timer.

TEKNISKE DATA

Frekvensomfang:	200-8000 Hz, -3 dB rel 1 kHz.
Mikrofoner:	2 stk. innebygd.
Innganger:	Ekstern mikrofon.
Utganger:	Halsslynge. Båndspiller (3,5 mm, inn: topp, ut: ring).
Batterier:	4 stk. LR6/AA 1,5 V penlight.
Driftstid:	ca 100 timer.
Feltstyrke:	+12 dB rel 100 mA/m ved 0,7 mV (70 dB SPL) fra mikrofonene i 45 cm avstand fra slyngen.
Forvrengning:	<3%.
Forsterkning:	0,7 mV fra mikrofonene gir ved maksimal forsterkning 250 mV ut på båndspillerutgangen. Båndspillerutgangen kan også brukes til avspilling.
Strømforbruk:	25-200 mA.
Vekt:	Ca 1,3 kg.
	Spørsmål knyttet til EUs direktiv for medisinsk utstyr 93/42/EEC bør rettes til GN ReSound A/S.
Varenummer:	415 04 04

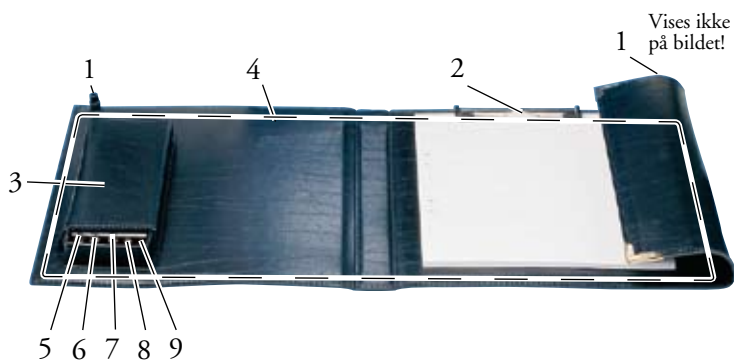

1. Mikrofoner
2. Papirklemme
3. Rom for batterier og halsslynge
4. Innebygd teleslynge
5. Inn- og utgang for båndspiller
6. Inngang for ekstern mikrofon
7. Utgang for halsslynge
8. Omkobler til/fra
9. Lysdiode som viser til/fra

KONTAKT:
GN ReSound AS
 Akersgaten 45
 Postboks 132 Sentrum
 0102 Oslo
 Telefon: 22 47 75 30
 Telefaks: 22 47 75 50
 info@gnresound.no
 www.gnresound.no

ANSVARLIG PRODUSENT
 i henhold til EUs direktiv for
 medisinsk utstyr 93/42/EEC:

GN ReSound A/S
 Lautrupbjerg 7
 DK-2750 Ballerup
 Danmark

For service og produktrelaterte
 spørsmål, kontakt
 GN ReSound AS i Norge.