

CONFERENCE™


En samtalsförstärkare med två mikrofoner och en teleslinga inbyggda i en elegant konferensmapp.

Praktisk konferensmapp

Conference™ är en unik produkt som underlättar för hörselskadade att delta i möten på arbetet och i hemmet. Två mikrofoner, en förstärkare och en teleslinga är inbyggda i en elegant konferensmapp, som användaren placerar på bordet framför sig.

Dubbla mikrofoner

Conference är försedd med två mikrofoner som förkortar talavståndet till mötesdeltagarna och överför ljudet till hörapparaten. Om man vill ha ännu kortare avstånd till den som talar, kan man använda en extern mikrofon, istället för de inbyggda.

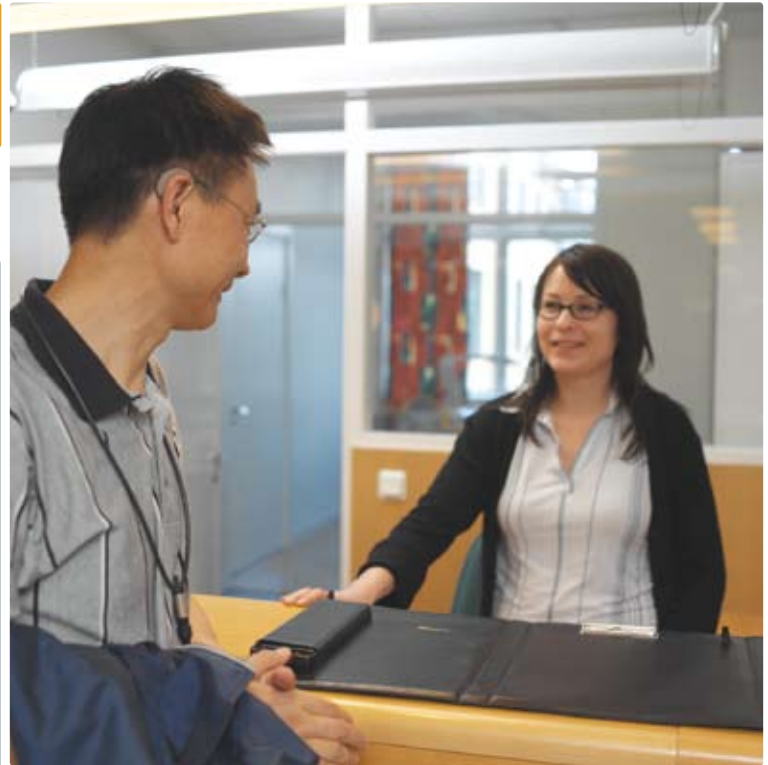

Inbyggd teleslinga

Den inbyggda teleslingan gör det möjligt för hörapparat användare att använda T-läget på hörapparaten. En halsslinga medföljer också, vilken ger lite större rörelsefrihet. Den inbyggda teleslingan kopplas ur när halsslingan används.

Spela in ett möte

Ibland vill man inte missa viktig information och då kan det vara praktiskt att spela in konversationen från ett möte. Conference är utrustad med ett 3,5 mm uttag, som används för både in- och uppspelning i mono.

Batteridrift

Conference drivs av batterier och har låg strömförbrukning. Vid normal användning räcker batterierna i ca 100 timmar.


TEKNISKA DATA

Frekvensomfång:	200-8000 Hz, -3 dB rel 1 kHz.
Mikrofoner:	2 st. inbyggda.
Ingångar:	Extern mikrofon.
Utgångar:	Halsslinga. Bandspelare (3,5 mm, in: topp, ut: ring).
Batterier:	4 st LR6/AA 1,5 V penlight.
Drifttid:	Ca 100 timmar.
Fältstyrka:	+12 dB rel 100 mA/m vid 0,7 mV (70 dB SPL) från mikrofonerna på 45 cm avstånd från slingan.
Distorsion:	<3%.
Förstärkning:	0,7 mV från mikrofonerna ger vid max förstärkning 250 mV ut på bandspelarutgången. Bandspelarutgången kan även användas för uppspelning.
Strömförbrukning:	25-200 mA.
Vikt:	Ca 1,3 kg.



Frågor rörande EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC hänvisas till GN ReSound A/S.

Artikelnummer: 415 04 04

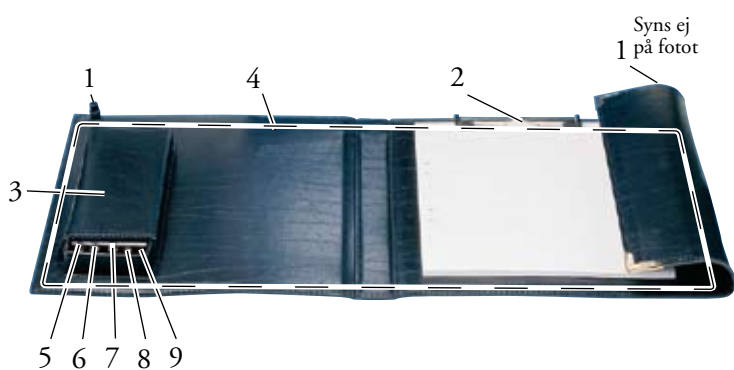

1. Mikrofoner
2. Pappersklämna
3. Fack för batterier och halsslinga
4. Inbyggd teleslinga
5. In- och utgång för bandspelare
6. Ingång för extern mikrofon
7. Utgång för halsslinga
8. Omkopplare Till/Från
9. Lysdiod som visar Till/Från

KONTAKT

GN ReSound AB
 Box 128 74
 112 98 Stockholm
 Tel. vxl. 031-800 150
 Fax 08-54 55 36 39
 info.ald@gnresound.se
 www.gnresound-ald.se

ANSVARIG TILLVERKARE

enligt EU:s medicintekniska direktiv 93/42/EEC:
GN ReSound A/S
 Lautrupbjerg 7
 DK-2750 Ballerup
 Danmark
 För service och produktrelaterade frågor: kontakta GN ReSound AB.