

Nieuw

# TS-150



## Het geluid van de TV rechtstreeks naar uw hoortoestel

Een ringleidingversterker voor thuis en voor ruimtes tot 150 m<sup>2</sup>. Perfect geluid voor alle slechthorenden die een hoortoestel dragen.

**Nieuw!** Nu met vertragingfunctie – voor perfecte synchronisatie van beeld en geluid van flatscreens

### Geschikt voor alle hoortoestellen met luisterspoel

TS-150 is geschikt voor alle slechthorenden die een hoortoestel met een luisterspoel dragen en die het geluid van televisie of radio willen horen zonder door andere geluiden te worden gehinderd.

### Werkt met een decoder

Wanneer de televisie verbonden is met een digitale decoder, Dvd-speler of videorecorder signaleert de TS-150 automatisch het apparaat van uw keuze. U hoort altijd het juiste geluid in uw hoortoestel.

### Automatische volumeregeling

TS-150 hoeft maar één keer ingesteld te worden. De Automatic Gain Control (AGC) houdt het geluid in het hoortoestel automatisch constant, ook als de televisie harder of zachter wordt gezet!

### Perfect geluid in de hele kamer


De TS-150 geeft u op iedere plek in de kamer een perfect geluid. Deze ringleidingversterker is geschikt voor ruimtes tot 150 m<sup>2</sup>. Ideaal voor thuis of voor een activiteitscentrum.

### Synchronisatie van beeld en geluid voor flatscreens – Vertragingfunctie

Op bepaalde LCD en PLASMA televisies lopen beeld en geluid niet synchroon. Dit kan worden aangepast met de vertragingfunctie. Hiermee kan een perfecte synchronisatie van beeld en geluid worden ingesteld. Voor oudere televisies kan de functie worden uitgeschakeld.

### Meerdere mensen kunnen tegelijkertijd luisteren

Met de TS-150 in een kamer kunnen alle slechthorenden met een hoortoestel tegelijkertijd luisteren. De TS-150 heeft ook aansluitmogelijkheden voor een microfoon en een PA-systeem.

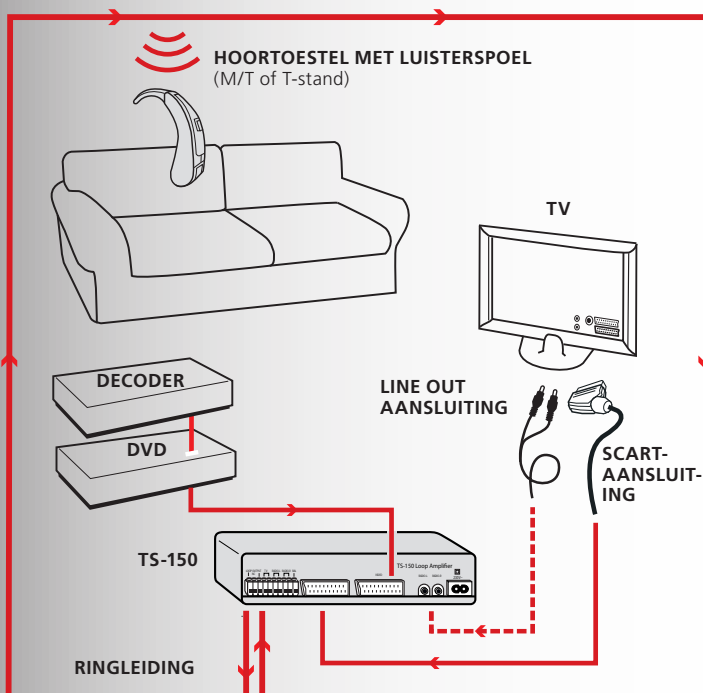

ReSound

rediscover hearing

## De TS-150 is geschikt voor:

- een televisie met een scartaansluiting (zie tekening op de voorzijde)
- een LCD/Plasma TV (Line Out aansluiting (zie tekening op de voorzijde)
- Stereo, radio, MP3-speler etc.

## Aansluiten en afregelen:

- Leg een ringleiding\* in de kamer waar de televisie staat en sluit deze op de TS-150 aan.
- Sluit de TS-150 aan op de televisie en op de videorecorder. (De overige apparaten worden in serie geschakeld).
- Regel het IN-niveau bij tot een geel lampje oplicht.
- Regel het OUT-niveau bij tot een rood lampje oplicht.
- Indien nodig, de vertraging instellen.
- Dat is alles! Hierna hoeft u de TS-150 niet meer aan te raken.

## Artikelnummer

**TS-150 Ringleidingversterker met vertragingfunctie, EU** **200 10 23**

### TS-150, 200 10 23, bevat:

TS-150 ringleidingversterker	200 10 32
Scartkabel	200 10 25
Netsnoer	
Schroeven, pluggen en schroevendraaier	
Microfoonadapter	

## Technische gegevens

### TS-150 ringleidingversterker

Bedrijfsspanning:	230V AC 50-60 Hz
Oppervlakte ringleiding:	In overeenstemming met IEC60118-4 tot 150 m <sup>2</sup>
Frequentiebereik:	In overeenstemming met IEC60118-4 100-5000 Hz $\pm$ 3dB
Distorsie:	<1%
Geluidsvertraging:	Verstelbaar: uit, 30-500 ms
AGC inregeltijd:	>125 ms
AGC uitregeltijd:	Snel 5 s / langzaam 30 s (dip switch)
Gewicht:	1,7 kg
Afmetingen (B x D x H):	250 x 140 x 55 mm
Bijzonderheden:	AGC: Langzaam, snel en uit Toon: Verstelbare treble
Ingangen:	TV, video, radio, gebalanceerd en microfoon

### Ringleiding

Weerstand: 0,5 – 1 Ohm

\* Aanbevolen ringleidingsnoer huiskamer 0,75 mm<sup>2</sup>

## PRODUCENT

*In de betekenis van de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG:*

### GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Denemarken



*Zaken betreffende de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG kunnen worden gemeld bij GN ReSound A/S.*

*Voor vragen over service of producten kunt u contact opnemen met GN Hearing Benelux B.V. in Nederland of België.*

9950087 Issue 2, 2010-03 We behouden ons het recht om veranderingen aan te brengen in uiterlijk en specificatie zonder kennisgeving vooraf.

[www.gnresound-ald.com](http://www.gnresound-ald.com)

Contactgegevens Nederland  
GN Hearing Benelux B.V.  
Postbus 85  
6930 AB Westervoort

Contactgegevens België  
Tel: 02 513 55 91  
Fax: 02 502 04 09  
E-mail: [info@gnresound.be](mailto:info@gnresound.be)

Tel: 026 - 3195000  
Fax: 026 - 3195001  
[info@gnresound.nl](mailto:info@gnresound.nl)  
[www.gnresound-ald.com](http://www.gnresound-ald.com)

ReSound

rediscover hearing