

TS-150™

Een ringleiding-versterker voor thuis en voor bedrijfsruimten tot 150 m².



Geschikt voor alle hoortoestellen met luisterspoel
De TS-150 is ideaal voor slechthorenden die een hoortoestel met luisterspoel gebruiken en het geluid van een tv of radio willen horen zonder door andere geluiden te worden gehinderd.

Werkt ook met digitale tv-ontvangers

Is uw tv op een digitale tv-ontvanger, video, dvd-speler e.d. aangesloten? Geen probleem, dankzij de automatische schakelfunctie wordt het geluid van het apparaat dat u hebt gekozen correct in uw hoortoestel weergegeven.

Automatische volumeregeling

U hoeft de TS-150 slechts één keer af te regelen. Daarna houdt de automatische volumeregeling (AGC) het geluid in uw hoortoestel constant, ook al wordt het volume van de tv gewijzigd. Iedereen tevreden.

Perfect geluid in de hele kamer

De TS-150 geeft overal in de kamer een perfect geluid. De TS-150 is geschikt voor ruimten tot 150 m². Ideaal voor thuis of voor andere ruimten b.v. kerk of recreatieruimten e.d.

Meerdere gebruikers


Met een ringleiding in de kamer kan een onbeperkt aantal gebruikers tegelijkertijd luisteren. Voor zover er genoeg plaats is natuurlijk. De TS-150 heeft ook ingangen voor een microfoon en een PA-systeem.

De TS-150 is geschikt voor:

- tv's met een scart-contact (zie afbeelding voor scart-aansluiting).
- LCD/plasma-tv (zie afbeelding voor line out).
- stereo's, radio's, MP3-spelers enz.

Aansluiten:

- Leg een ringleiding in de tv-kamer en sluit deze op de TS-150 aan.
- Sluit de TS-150 tussen de tv en de video aan. (Overige apparaten worden in serie geschakeld.)
- Regel het IN-niveau bij tot er een geel lampje gaat branden.
- Regel het OUT-niveau bij tot er een rood lampje gaat branden.
- Dat is alles. Hierna hoeft u de TS-150 niet meer aan te raken!

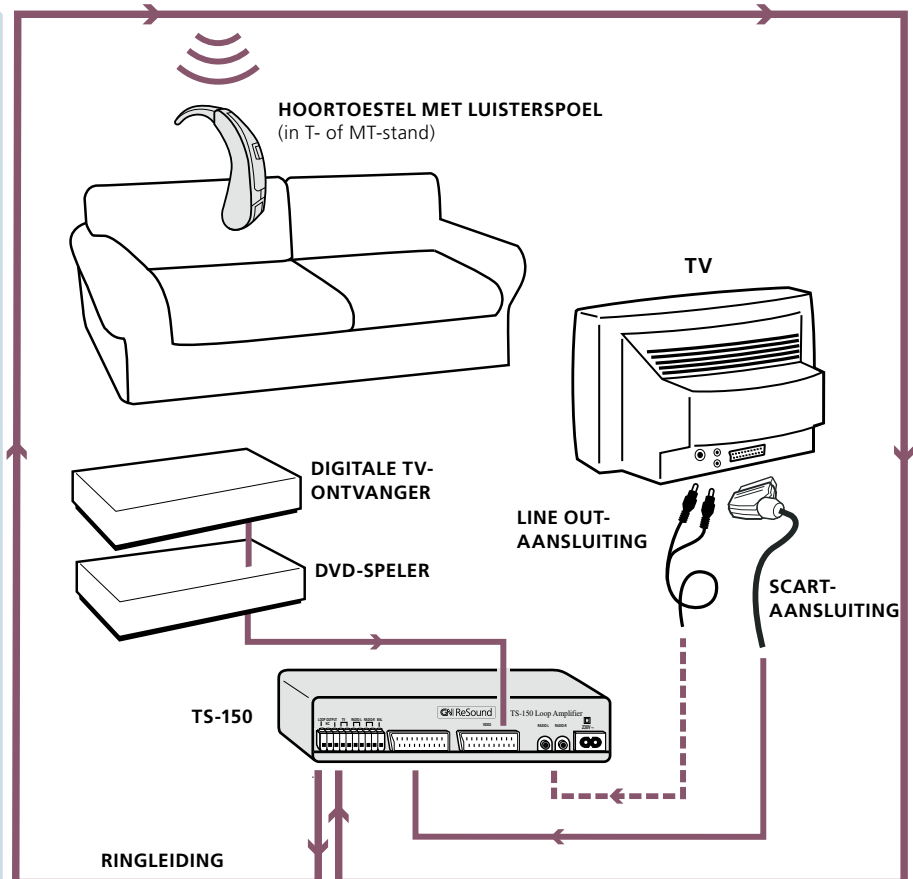

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische specificaties

TS-150 ringleidingversterker

Bedrijfsspanning:	230 V AC 50-60 Hz
Ringleidingoppervlakte:	Conform IEC60118-4 opp tot 150 m ²
Frequentiebereik:	Conform IEC60118-4 100-5.000 Hz ±3 dB
Vervorming:	<1%
Inregeltijd:	>125
Uitregeltijd:	Snel 5 sec, langzaam 30 sec (dip-switch)
Gewicht:	1,7 kg
Afmetingen (b × d × h):	250 × 140 × 55 mm
Eigenschappen:	AGC: Langzaam, snel en uitgeschakeld
	Geluid: Hoge tonen regeling
Ingangen:	tv, video, radio, gebalanceerd en microfoon

Ringleiding

Weerstand:	0,5 – 1 Ohm
------------	-------------

Artikelnummer

TS-150, loop amplifier, EU **200 10 23**

Meegeleverd bij TS-150, loop amplifier, EU:

TS-150 ringleidingversterker	200 10 32
Scartkabel	200 10 25
Netsnoer	–
Schroeven, plug en schroevendraaier	

CE Alle zaken betreffende de EU-Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG dienen gemeld te worden aan GN ReSound A/S.

Andere mogelijkheden voor het juiste TV-geluid



AutoMini

Kleinere ringleidingversterker voor stoelringleiding (meegeleverd) of ringleiding voor max. 20 m², met dezelfde automatische geluidsschakelfunctie als bij de TS-150. De AutoMini is geschikt voor alle typen tv-apparaten, is eenvoudig te installeren en kan mee op reis worden genomen.

AutoMini set, EU 200 21 81



Transsett Mini

De voorganger van AutoMini. Eenvoudige luisterhulp voor stoel- of halsringleidingen. Op de TV aan te sluiten met een scartkabel of microfoon.

Transsett Mini set, EU 200 21 48

BELGIË:

GN ReSound Belgium n.v.
Pontbeekstraat 2 (2de verdiep)
B-1702 Groot-Bijgaarden
Tél. +32 2 229 34 60
Fax +32 2 229 34 69

www.gnresound-ald.com

NEDERLAND:

GN ReSound bv
Postbus 85
NL-6930 AB, Westervoort
Het Hazeland 5-7
NL-6931 KA, Westervoort
Tél. +31 26 31 95 000
Fax +31 26 31 95 001
info@gnresound.nl

www.gnresound-ald.com

PRODUCENT

*in de betekenis van
Europese Richtlijn Medische
Hulpmiddelen 93/42/EEG:*

GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denemarken

*Voor vragen m.b.t. service en producten:
zie contactgegevens voor elk land.*