

# TS-150™

En teleslyngeforsterker til bruk i hjemmet og i andre lokaler opp til 150 m<sup>2</sup>. Gir full bevegelsesfrihet i hele rommet og perfekt TV-lyd i høreapparatet.



Passer alle høreapparat med telespole  
TS-150 passer for deg som bruker høreapparat med telespole og som ønsker å høre TV-lyden klart og tydelig.

## Fungerer med digitalboks

TS-150 er også egnet til digitalboks, video, DVD osv. og sørger for at du automatisk får den lyden du ønsker i ditt høreapparat.

## Velg ditt eget TV-volum

Man stiller inn TS-150 kun én gang. Når dette er gjort vil du ikke bli påvirket av det volum de øvrige familiemedlemmer vil ha på TV. Alle blir fornøyd.

## Perfekt lyd i hele rommet

Du får perfekt lyd uansett hvor du befinner deg i rommet. TS-150 fungerer på en teleslynge med en lengde på hele 150 m<sup>2</sup>. Passer utmerket hjemme eller for eksempel i forsamlingslokaler.

## Flere kan høre samtidig


Med en teleslynge i TV-rommet, kan et ubegrenset antall bærere av høreapparat benytte seg av teleslyngen samtidig. TS-150 har også inngang for mikrofon og PA-system.

## TS-150 passer til:

- TV-apparater med scart-kontakt (scart-kobling, se illustrasjon).
- LCD/Plasma-TV (linje ut-kobling, se illustrasjon).
- Stereo, radio, MP3-spillere osv.

## Tilkobling:

- Legg ut en teleslynge i TV-rommet og koble den til TS-150.
- Koble til TS-150 mellom TV og video (eventuelle øvrige enheter kobles også inn i serien).
- Juster innvået, til en gul pære lyser.
- Juster utnivået, til en rød pære lyser.
- Da er alt klart og du behøver ikke justere TS-150 mer.

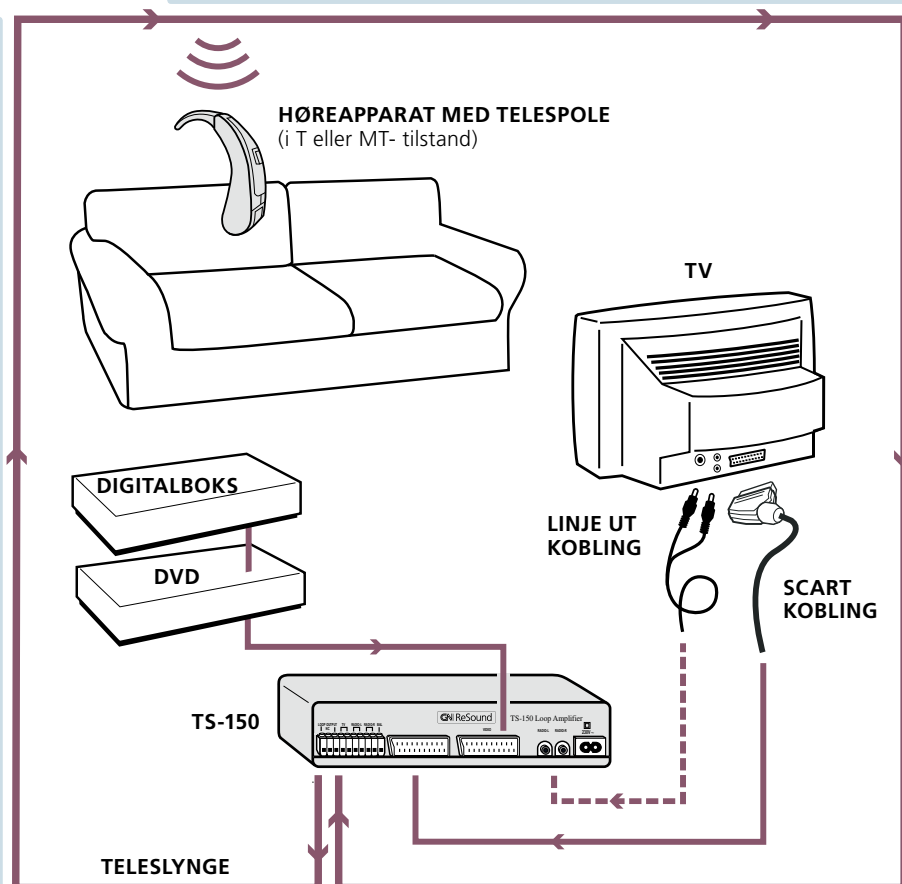

# TEKNISKE DATA

## Tekniske spesifikasjoner

### TS-150 slyngeforsterker

Driftspenning:	230V AC 50-60 Hz
Dekningsareal:	Enl. IEC60118-4 opp til 150 m <sup>2</sup>
Frekvensområde:	Enl. IEC60118-4 ved 100-5000 Hz $\pm$ 3dB
Forvrengning:	< 1%
Innsvingningstid:	> 125 ms
Utsvingningstid:	Fast 5 s / Slow 30 s (dip switch)
Vekt:	1,7 kg
Mål (B x D x H)	250 x 140 x 55 mm
Egenskaper:	AGC: Langsom, hurtig og avslått Lyd: Justerbar diskant
Innganger:	TV, video, radio, balansert og mikrofon

### Teleslyngen

Motstand:	0,5 – 1 Ohm
-----------	-------------

## Artikkelnummer

**TS-150, loop amplifler, EU 200 10 23**

### *Inngår i TS-150, loop amplifler, EU:*

TS-150 slyngeforsterker	200 10 32
Scartkabel	200 10 25
Nettkabel	–
Skruer, plugg og skrujern	–



Spørsmål knyttet til EUs direktiv for medisinsk utstyr 93/42/EEC bør rettes til GN ReSound A/S

## Andre løsninger for riktig TV-lyd



### Mini

Mindre slyngeforsterker til bruk av stolslynge (følger med) eller fast slynge på opp til 20 m<sup>2</sup>. Samme automatiske omkoblingsfunksjon som finnes på TS-150. Mini passer alle typer TV-apparater, er lett å installere og å ta meg seg på reise.

**Lydforsterker Mini,  
Stolslynge komplett 200 21 81**



### Transett Mini

Forgjengeren til Mini. Enkel forsterkning til stol- eller hals-slynge. Kobles til TV via scart eller mikrofon.

**Transett Mini set, EU 200 21 48**

#### ANSVARLIG PRODUSENT

*I henhold til EUs direktiv for medisinsk utstyr 93/42/EEC:*

#### GN ReSound A/S

Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Danmark

*For service og produktrelaterede spørsmål, kontakt GN ReSound AS*

#### KONTAKT

**GN ReSound AS**  
Pb. 132 Sentrum  
0102 Oslo

Tlf.: 22 47 75 30  
Faks: 22 47 75 50  
info@gnresound.no

**www.gnresound.no**