



ReSound modeX

Overzicht modeX Teacher/Student (zender)

Microfoon

Indicatielampje
Groen = batterij oké
Rood = batterij bijna leeg

Aan/uitknop
Leerlingenmicrofoon: Tijdens het spreken moet men de aan/uit knop ingedrukt houden.
Leerkrachtmicrofoon: De microfoon wordt in/uitgeschakeld door de aan/uitknop eenmaal in te drukken.

Knop OMHOOG ▲
Leerlingenmicrofoon: inschakeld zonder de push-to-talk-toets ingedrukt te houden (voor activatie, zie ontvangerhandleiding)

Knop OMLAAG ▼
(voor programmeren)

Accu opladen

De microfoon kan in de lader worden gedraaid.

Indicatielampje
Groen = volledig geladen
Rood = bezig met laden

Aansluiting voor net-adapter (6 V).

Accu's vervangen (alleen door gecertificeerd personeel)

1. Open het batterijdeksel.
2. Neem de accu uit het batterijvak met de negatieve pool eerst.
3. Neem het batterijcontact uit het batterijvak.
4. Plaats een nieuwe accu op vergelijkbare wijze (maar in omgekeerde volgorde).

NB! Gebruik nooit alkalinebatterijen.

Overzicht modeX Receiver (ontvanger), voorkant

Indicatielampje
Groen = ontvangst signaal, een microfoon staat aan.
Rood = geen signaal.

Display

Overzicht ontvanger, achterkant

Aansluiting van kabels/antennes bij gebruik van meerdere ontvangers

1. Ingang voor antenne/ontvanger
2. Antenne-uitgang voor extra ontvanger
3. DC in, 6V
4. DC uit, 6V
5. Line In/Line Out (3,5 mm contact, ongebalanceerd)
6. Vergrendelingstoets voor display
7. Line out (6,3 mm contact, gebalanceerd)



Problemen verhelpen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Actie
Geen geluid van de microfoon.	Batterij leeg? (LED licht niet op bij het aanzetten van de microfoon.)	Accu opladen.
	Staat één van de studenten microfoons "alleen lezen spraak mode"? meerdere zenders aanwezig.	Gebruik slechts één microfoon tegelijk op hetzelfde kanaal.
	De frequentie is niet gelijk voor de ontvanger en de zender (zie Display).	Zet de frequenties ontvanger/zender gelijk.
	Is de line-out kabel tussen modeX ontvanger en ringleidingversterker/FM zender aangesloten?	Sluit deze kabel aan.